

Elektronik

KULLANIM TALİMATLARI

Kılavuzlar deęiřiklięe tabidir; her kılavuzun en g¼ncel s¼r¼m¼ ¼evrimi¼i olarak her zaman mevcuttur.



PB Swiss Tools AG
Bahnhofstrasse 24
CH-3457 Wasen/Bern
www.pbswisstools.com

CE 1250

Elektronik Kullanım Talimatları



Kullanım öncesinde lütfen bu kullanım talimatlarını ve ilgili tüm belgeleri dikkatle okuyun.
Uygun cerrahi tekniği bildiğinizden emin olun.

Amaçlanan kullanım

Özellikle:

- Açılı sabit vidalar
- Korteks vidaları
- Süngerimsi kemik vidaları
- Şaft vidaları
- Kanüllü vidalar
- Kilitleme vidaları
- Kilitleme cıvataları

olmak üzere, aşağıdaki standart işletimli ve titanyum, titanyum alaşımları ve paslanmaz çelikten üretilmiş hasarlı, hasarsız veya kırık vidaların çıkarılması için¹⁾:

Altıgen vida
başı



Torx®/Stardrive®
vida başı



Kare/Robertson
vida başı



Haç şeklinde
vida başı



Yuvalı vida
başı




Yıldız vida
başı



¹⁾ Tornavida, standart ortopedik tornavida uçlarına karşılık gelen OPERACE'ye takılan ve en azından aşağıdaki özellikleri karşılayan vidalarla uyumlu: ASTM F 543, ISO 5835, ISO 10664 ve ISO 9268

STERİL TEK KULLANIMLIK UÇLAR

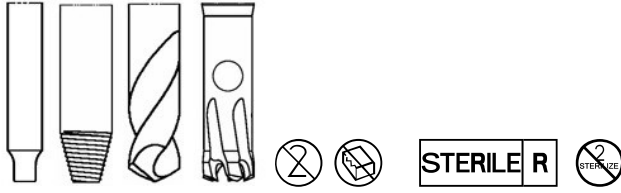

Tek kullanımlık tornavida uçları, çıkartma vidaları, matkaplar ve oyucular, double (soğuk) blister ambalajlarda steril biçimde temin edilir ve sadece tek kullanımlıktır.



Kullanmadan önce, ürünün son kullanma tarihini kontrol edin ve steril ambalajın bütünlüğünün bozulmamış olduğundan emin olun. Ambalaj hasarlıysa ürünü kullanmayın. Tek kullanımlık cihaz.

Vidaları çıkaracak doğru alet boyutu, işlem sırasında vidanın çıkışını kolaylaştırmak ve daha fazla zarar görme riskini azaltmak için dikkatle seçilmelidir.

Tornavida ucu



- Yuva tornavida uçlarını sadece manüel olarak kullanın.
- Tornavida ucunun vida başına tamamen girmesine dikkat edin; aksi takdirde uç, başın içinde boşa dönebilir.

Çıkartma vidası



- Sola doğru, saat yönü tersinde döndürün.
- Çıkartma vidalarını sadece işletim başı hasarlı olan vidaları çıkarmak için kullanın.
- Çıkartma vidalarını sadece manüel olarak kullanın.

Çıkartıcı matkap ucu




- Sağa doğru, saat yönünde döndürün.
- Matkap ucunu hareketsiz durumdayken değil, dönerken uygulayın.
- Başlangıçta sadece elektrikli aletin ağırlığını kullanarak çok az basınç uygulayın ve işleme düşük hızla başlayın.
- İşlem sırasında ucu soğutun ve matkap talaşını vakumla toplayın. Aşırı ısınmayı önlemek için, matkabın üzerindeki basıncı zaman zaman hafifletin.
- Uç başın tabanına ulaştığında, iyi talaş oluşumu elde etmek için vida üzerindeki basıncı artırın.
- Ucu, kemikte matkapla delik açmak veya kırık tornavida uçlarını matkapla çıkarmak için kullanmayın.

Çıkartma oyucusu



- Sola doğru, saat yönü tersinde döndürün.
- Oyucuyu sökerken basıncı hafifletmeyin, ancak sabit aksenal basıncı ve dönüş yönünü muhafaza edin.
- Elektrikli bir alet kullanılıyorsa son derece düşük hızda çalıştırılmalıdır.
- İşlem sırasında oyucuyu soğutun ve matkap talaşını vakumla toplayın.
- T-Elceği ve Jacobs Chuck içeren manüel bir prosedür tercih edilmektedir.

ÇOK KULLANIMLIK ALETLER

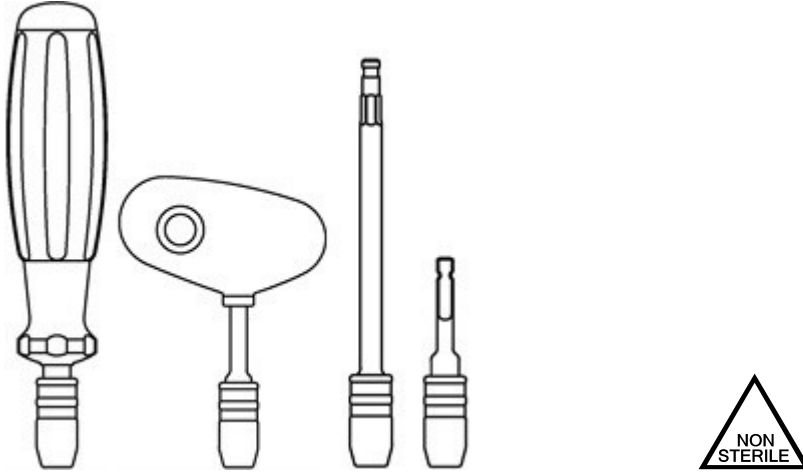

⚠ OPERACE elcekler, çapraz elcekler, ekstansiyonlar ve AO adaptörler, steril olmayan koşullarda temin edilir. Cerrahi kullanım öncesinde temizlenmeleri ve buharla sterilize edilmeleri gerekir. Şu belgede verilen ayrıntılı talimatlara başvurun:




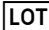






















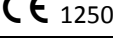







YENİDEN KULLANILABİLİR ALETLER İÇİN TEMİZLİK VE STERİLİZASYON TALİMATLARI

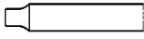⚠ Aletin hasarlanmasına veya kırılmasına yol açabileceğinden, darbelerden ve eğilme yüklerinden kaçınılmalıdır.

Yan etkiler

⚠ Tüm büyük cerrahi prosedürlerde olduğu gibi, riskler, yan etkiler ve olumsuz olaylar meydana gelebilir. Çok sayıda farklı reaksiyon oluşabilir ve aşağıdaki durumlar en sık görülenler arasındadır: Anestezi ve hastanın pozisyonundan (örn. bulantı, kusma, nörolojik bozukluklar, vb.), tromboz, emboli veya enfeksiyonlardan kaynaklanan sorunlar. Sinirlerin, kan damarları dahil olmak üzere diğer kritik yapıların veya yumuşak dokunun hasarlanması. Bir aletin kayması veya kırılması ile meydana gelen yumuşak doku yaralanmaları. Delme veya öğütme sırasında yüksek hız, yüksek basınç, yetersiz soğutma nedeniyle aşırı ısınma sonucunda meydana gelen yanıklar, nekrozlar. Anormal yara oluşumları, ağrı, rahatsızlık hissi, alerji veya aşırı duyarlılık reaksiyonları.

SİMGELERİN YORUMLANMASI

| | |
|---|---|
|  | Katalog numarası |
|  | Parti No./Parti Kodu |
|  | Seri numarası |
|  | Üretici |
|  | Üretim tarihi |
|  | Son kullanma tarihi |
|  | Steril değildir |
|  | Elektronik belgeleri okuyun |
|  | Radyasyonla sterilize edilmiştir |
|  | Tek kullanımlıktır |
|  | Tekrar sterilize etmeyin |
|  | Steril paket zarar görmüşse kullanmayın |
|  | Dikkat, kullanım talimatlarına başvurun |
|  | Altıgen vida başı |
|  | Torx®/Stardrive® vida başı |
|  | Kare/Robertson vida başı |
|  | Haç şeklinde vida başı |
|  | Yuvalı vida başı |
|  | Yıldız vida başı |
|  | Vida çapı |
|  | Tornavida ucu |
|  | Çıkartma vidası |
|  | Çıkartıcı matkap ucu |
|  | Çıkartma oyucusu |
|  | Onaylı denetim kurumunun tanımlama numarası ile birlikte CE işareti |
|  | Güç uygulayın |
|  | Çok az basınç |
|  | Saat yönünde döndürün |
|  | Saat yönü tersinde döndürün |
|  | Sadece manüel olarak kullanın |
|  | Soğutma |
|  | Yavaş hız |